

SimMan3GとSimView の確実な起動方法

TSEC20160822


SimMan3GとSimViewの確実な 起動方法 電源の順番

- SimMan3Gの電源を入れる
- マネキンの自発呼吸が始まるまで待つ(約2-3分)



SimMan3GとSimViewの確実な 起動方法 電源の順番

- インストラクターPCの電源を入れる
- インストラクターPCログイン
- Laerdal Simulation Homeを起動

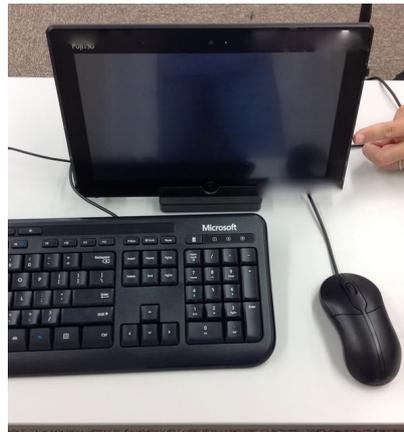

SimMan3GとSimViewの確実な起動方法 サーバーの電源は最後に

- ペイシャントモニター
PCの電源を入れる
- ペイシャントモニター
PCログイン
- PatientMonitorが自
動的に起動する



SimMan3GとSimViewの確実な起動方法
サーバーの電源は最後に

- SimView サーバー
PCの電源を入れる
- サーバーPCの
SimView を起動する
- インストラクターPCで
SimView サーバーの
選択(SimView1135
を選択する。あるいは
自動的に選択され
る。)



SimMan3GとSimViewの確実な起動方法
サーバーの電源は最後に


- ペイシャントモニターPCの電源を入れる
- ペイシャントモニターPCログイン
- PatientMonitorが自動的に起動する
- SimView サーバーPCの電源を入れる
- サーバーPCのSimView を起動する
- インストラクターPCでSimView サーバー
の選択(SimView1135を選択する。あるいは
自動的に選択される。)

インストラクターPCでSimView サー バーの選択(SimView1135を選択 する。)LLEAP設定




セッション終了メニューからデブ リーフィングシステムの選択

- LLEAPでプログラムの
スタート
- LLEAPでプログラムの
終了

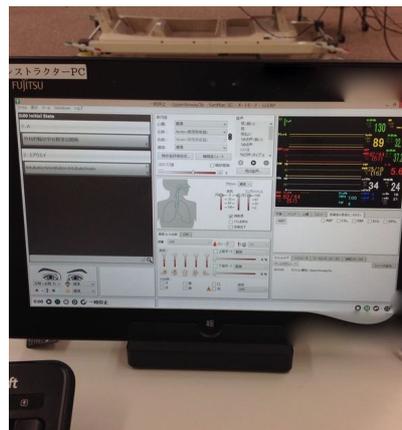

セッション終了メニューからデブリーフィングシステムの選択

- セッション終了メニューからデブリーフィングシステムの選択
- インストラクターPCでSimViewの起動ログイン(2回目からは不要)

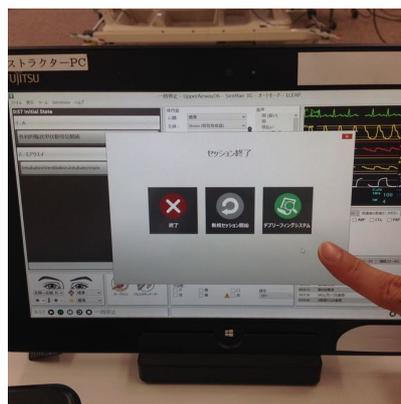

セッション終了時デブリーフィングシステムを選択



ペイシャントモニターPCで SimViewを起動、ログイン

- ペイシャントモニター
PCでペイシャントモニター
最小化する
- ペイシャントモニター
PCでSimViewを起動、
ログイン
- SimViewを起動画面
の左上に最新のファ
イルが現れる。

